

ABENA Slip Premium Special L4

INCONTINENCE

ABENA Slip

Special
L4



100 – 150
cm

5 gouttes				M0	L0		
6 gouttes				M1	L1		XXL1
7 gouttes	JUNIOR XS2	XS2	S2	M2	L2	XL2	
8 gouttes				M3	L3		
9 gouttes			S4	M4	L4	XL4	
9 gouttes				Spe M4	Spe L4		

UTILISATEURS

UNISEXE

DÉPENDANT / ALITÉ

INCONTINENCE TRÈS SÉVÈRE

NUIT

HANDICAP

Description

ABENA Slip Special est le change complet premium et écolabellisé, développé pour les personnes souffrant d'incontinence très sévère. Il est conçu pour apporter une sécurité maximale contre les fuites dans les situations les plus exigeantes, en cas de mictions spontanées et très fortes. La solution idéale pour les personnes incontinentes touchées par un handicap et nécessitant un niveau de sécurité anti-fuites bien plus élevé.



Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Attaches extensibles

Les attaches offrent un ajustement sur-mesure et un repositionnement facile lorsque l'adhésif bleu est retiré.



Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.



Barrières anti-fuites

Les différentes barrières (latérales et arrière) et élastiques anatomiques offrent un ajustement parfait et une sécurité à 360°.



Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.



Conception spéciale

La conception du coussin absorbant permet de solutionner les fuites les plus sévères et abondantes.



Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.



ABENA Slip Premium Special L4

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
12	5713571008164	2 053	38 x 18 x 30	48	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	Code GTIN carton	Poids brut carton (g)	Dimensions carton Long x larg x haut (cm)	Cartons / palette (gerbée)	Hauteur palette (cm)
4	5713571008171	8 982	61,6 x 40 x 36,7	12 (24)	130



GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur.

ABENA Slip Special L4 est à utiliser en dernier recours, lorsque le change complet Slip L4 ne peut plus répondre au besoin de l'utilisateur.

Tour de hanches: 100-150 cm

POSITION COUCHÉE

- Former une gouttière en pliant le change sur sa longueur. Ne pas toucher l'intérieur de la protection.
- Placer le résident sur son côté. A - Positionner la protection, « gouttière » en main, entre les jambes. B - Ajuster la face arrière du change.
- Utilisateur sur le dos. Ajuster la face avant du change. Rabattre les flaps arrière sur la parti avant et fixer les attaches du bas. S'assurer que le change soit maintenu étroitement sur le corps.
- A - Fixez les attaches hautes en les orientant vers le bas. B - Ajuster les bords autour de l'aine.

POSITION DEBOUT

- Toujours veiller à faire la gouttière. S'assurer que le résident soit bien en appui. Glisser la protection, « gouttière » en main, entre les jambes.
- Maintenir la partie arrière de la protection avec la jambe. Tirer la face avant du change. Fixer les attaches basses sur la face avant.
- Fixer les attaches hautes en les orientant vers le bas. Ajuster les bords du change autour de l'aine.

PRODUITS ASSOCIÉS

Le choix et la combinaison adéquats des protections d'incontinence

Approche globale
des soins de continence

Une approche structurée de l'hygiène

Toilette & soins de la peau adaptés

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

